

# Fellshop & Gerberei BÖHNISCH

Wasen 10  
79244 Münstertal  
Telefon 07636 / 1513  
Internet: [www.fellshoponline.de](http://www.fellshoponline.de)  
Email : [info@gerberei-boehnisch.de](mailto:info@gerberei-boehnisch.de)

## ANLEITUNG ZUM WASCHEN VON MEDIZINAL GEGERBTEN SCHAFFELLEN

Sehr geehrte Damen und Herren

Da beim Waschen von Fellen immer wieder Fehler passieren, hier eine kleine Hilfestellung, damit Sie mehr Freude mit unseren Fellen und Fellprodukten haben.

Jedes medizinisch gegerbte Fell kann von Hand, oder in der Waschmaschine ( große Decken in der Badewanne ) mit **30 Grad warmen Wasser** und unserem Spezialwaschmittel oder Waschmittel mit Lanolin (erhältlich in der Drogerie) gewaschen werden. Bei von Hand gewaschenen Fellen oder Decken kann man den Schaum abspülen, und das Wasser etwas herausdrücken und zum Trocknen aufhängen.

Es ist äußerst wichtig, dass während des Trocknens bei **Zimmertemperatur** das Fell von Zeit zu Zeit immer wieder in verschiedene Richtungen gezogen wird. Dieser Vorgang verhindert, dass die Faser – aus der Leder ja besteht – nicht festtrocknet.

Die gleiche Erscheinung ist bei Handtüchern festzustellen, die nach dem Waschen in einer ruhigen Position ( ohne Bewegung ) aufrocknen. Deshalb ist es wichtig das Fell nach dem Waschen zu rubbeln und in Form zu ziehen.

Da es sich bei Fellen um Naturfasern handelt, ist es nicht zu umgehen, dass nach dem Waschen nicht mehr die volle Elastizität aufweist und etwas einläuft. Je öfter der Waschvorgang wiederholt wird, desto mehr läuft die Faser ein.

Da Wolle jedoch eine hohe Selbstreinigung hat, ist es ratsam, mit dem Schaum des Fellwaschmittels die verschmutzte Wolle zu reinigen, an der Luft zu trocknen und mit einer Bürste gut auszubürsten. Wir empfehlen Ihnen das spezielle Fellwaschmittel welches Sie zu Ihrem Fell dazu gekauft haben.

Die so behandelten Felle zeigen eine viel längere Haltbarkeit, da nur die Wolle, nicht aber das Leder einer Behandlung unterzogen wird.